

សំរាប់អ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពប៉ុន្តោះដើម្បីឃ្នាំមើលការបៀកយកជាតិសំណើមពីច្រមុះដោយខ្លួនឯងនិងមិនមែនសំរាប់ការប្រើនៅផ្ទះ

ការណែនាំពីរបៀបបៀកយកជាតិសំណើមពីច្រមុះដោយខ្លួនឯង

ការបៀកយកជាតិសំណើមពីច្រមុះ(តាមប្រហោងរន្ធច្រមុះ)

សមាសភាគឧបករណ៍បៀក




បំពង់(ផ្ទុកសារធាតុរាវ)



ដាក់ចូលក្នុង
រន្ធច្រមុះ

ដងកាន់

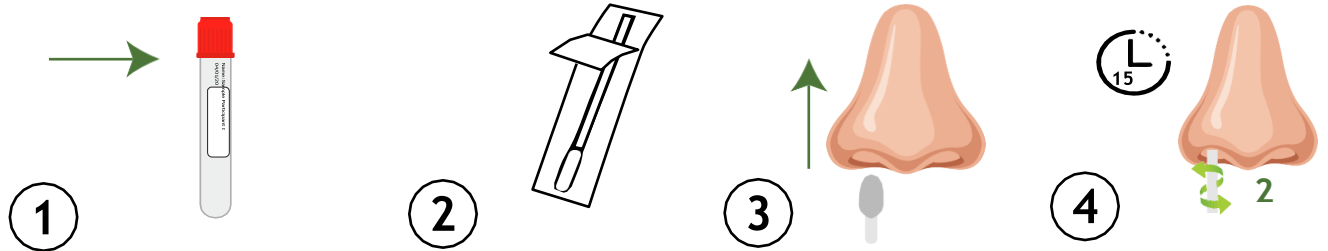

1. បកផ្ទាំងដែលនៅខាងក្រោមនៃក្របដាស់ធ្វើតេស្ត រួចបំពេញឈ្មោះ ថ្ងៃខែកំណើតហើយបិទទាញនៅលើបំពង់។
2. យកឧបករណ៍បៀកចេញពីកញ្ចប់ហើយសូមកុំប៉ះផ្នែកខាងចុងដែលមានសំឡី។
3. ងើយក្បាលទៅក្រោយ បន្តិចរួចសឹកបញ្ចូលឧបករណ៍បៀកទៅក្នុងរន្ធច្រមុះខាងឆ្វេងប្រហែល១អ៊ីញ។
4. បង្វិលឧបករណ៍បៀកក្នុងចលនាជារង្វង់ជុំវិញគែមខាងក្នុងទាំងមូលនៃរន្ធច្រមុះ។ ធ្វើ២ដងរួចទុកវាអោយជាប់រយៈពេល១៥វិនាទី។

5. ខណៈពេលកាន់ឧបករណ៍បៀក សូមមូលគម្របចេញពីបំពង់។ សូមរក្សាសារធាតុរាវនៅក្នុងបំពង់កុំអោយកំពប់។
 6. កាច់បំបាក់ឧបករណ៍បៀកនៅត្រង់ផ្នែកដែលគេចោះសំរាប់កាច់បាន។
 7. មូលបិទគម្របបំពង់វិញ រួចដាក់ចូលក្នុងកញ្ចប់។ នឹងប្រាកដថាក្រដាស់ធ្វើតេស្តបានដាក់ចូលក្នុងកញ្ចប់ជាមួយគ្នា(បើមាន) រួចបិទកញ្ចប់។
- ប្រសិនបើផ្ទាំងនោះមិនអាចប្រើបាន សូមសរសេរឈ្មោះ និងថ្ងៃខែកំណើតរបស់អ្នកនៅលើផ្ទាំងដែលមានស្រាប់នៅលើបំពង់ដោយប្រើប្រាស់បិទពណ៌ខៀវវិញ។
 - ធ្វើដូចគ្នាចំពោះរន្ធច្រមុះខាងស្តាំដោយប្រើឧបករណ៍ដដែល។
 - សូមរក្សាសារធាតុរាវនៅក្នុងបំពង់កុំអោយកំពប់។
 - សឹកបញ្ចូលឧបករណ៍ដែលបៀកហើយទៅក្នុងបំពង់ដើម្បីអោយផ្នែកខាងចុងសំឡីប៉ះនឹងបាតបំពង់ និងដងទល់ទៅនឹងគែមនៃបំពង់។
 - ដាក់កញ្ចប់ដែលមានបំពង់និងក្រដាស់ធ្វើតេស្តចូលទៅក្នុងប្រអប់រួចបិទគម្រប។