


Instrucciones de auto-colección

Colección nasal (Nares anteriores)

Componentes del kit de colección




Tubo (contiene líquido)

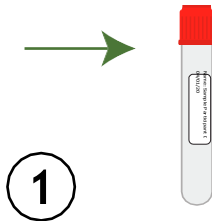


1

- Despegue la etiqueta con su nombre y fecha de nacimiento en la parte inferior de la solicitud de prueba y colóquelo en el tubo.
- Si una etiqueta prellenada no está disponible, escriba su nombre y fecha de nacimiento en la etiqueta del tubo con tinta negra o azul.

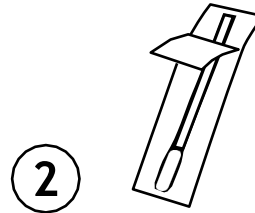


2

¡Retire el hisopo (cotonete) del paquete y no toque la punta del hisopo!

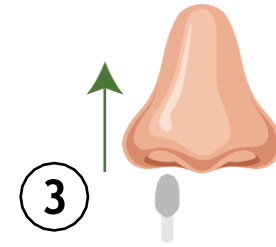


3

- Coloque su cabeza ligeramente hacia atrás e inserte el hisopo en la fosa nasal IZQUIERDA, aproximadamente una pulgada.

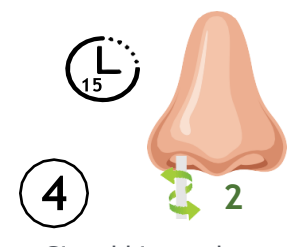


4

- Gire el hisopo de manera circular alrededor de todo el borde interior de la fosa nasal. Haga esto dos veces y luego manténgalo en su fosa nasal por 15 segundos.
- Repita el mismo proceso en la fosa nasal DERECHA usando el mismo hisopo.

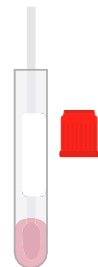

5

- Mientras sostiene el hisopo, retire la tapa del tubo. No derrame ni beba el líquido.
- Inserte el hisopo en el tubo de modo que la punta toque el fondo del tubo y el eje del tubo repose contra el borde del tubo.

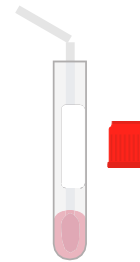


6

- Rompa el eje del hisopo contra el lado del tubo al punto de quiebre perforado.




7

- Enrosque la tapa en el tubo y coloque el tubo en la bolsa. Asegúrese de colocar la solicitud dentro de la bolsa (si aplica). Selle la bolsa.
- Coloque la bolsa de colección y documento de la prueba en la caja y cierre la tapa de la caja.

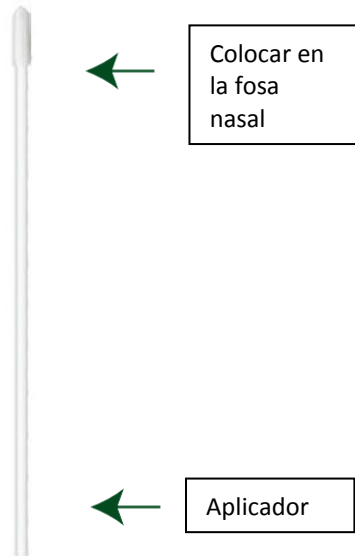

Colocar en la fosa nasal

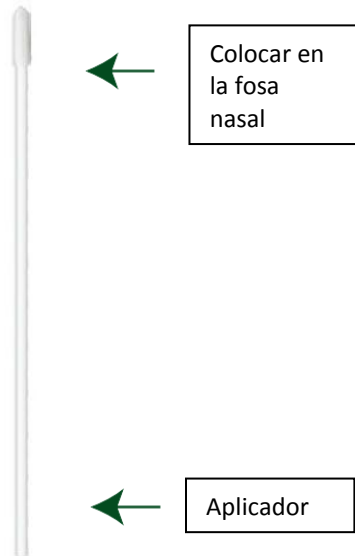

Aplicador