

Hướng dẫn tự thu thập

Bộ sưu tập sal (Anterior Nares)

Thành phần bộ sưu tập




Ống (chứa chất lỏng)



Đặt trong
lỗ mũi


Que cầm

1

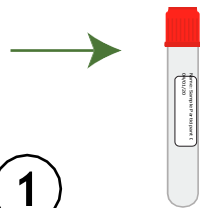


- Bóc nhãn có tên và ngày sinh của bạn ở dưới cùng của yêu cầu thử nghiệm và đặt nó trên ống
- Nếu không có nhãn điền sẵn, hãy viết tên và ngày sinh của bạn trên nhãn ống bằng bút màu xanh lam hoặc đen.

2

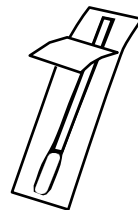


- Lấy tăm bông ra khỏi gói và không chạm vào đầu tăm bông!

3

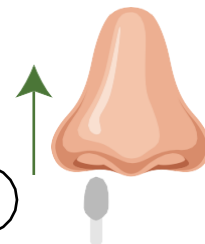


- Vị trí đầu hơi ngả ra sau và nhét miếng gạc vào lỗ mũi TRÁI, khoảng một inch.

4

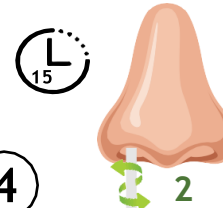

- Xoay miếng gạc theo chuyển động tròn xung quanh toàn bộ cạnh trong của lỗ mũi. Làm điều này 2 lần và sau đó giữ nó trong 15 giây.
- Lặp lại quy trình tương tự trong lỗ mũi PHẢI bằng cách sử dụng cùng một miếng gạc.

5

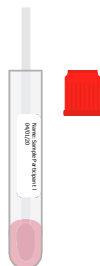


- Trong khi giữ miếng gạc, hãy tháo nắp ra khỏi ống. Không làm đổ hoặc uống chất lỏng.
- Đưa tăm bông vào ống sao cho đầu tăm chạm vào đáy ống và trục của tăm bông nằm tựa vào vành ống.

6



- Bẻ gãy tay cầm tăm bông vào thành ống tại điểm dừng đục lỗ

7

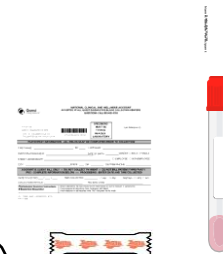

- Vặn nắp vào ống và đặt ống vào cái túi. Đảm bảo yêu cầu giấy được đặt trong túi (nếu có). Niêm phong túi.
- Đặt túi thu gom và kiểm tra yêu cầu trong hộp và đóng nắp.